

ergoflix

Sicherer Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus

Akku-Guide

ergoflix[®] L und LX (inkl. Plus-Varianten)



ergoflix.de

Inhaltsverzeichnis

Mit diesem Akku-Guide erhältst Du wertvolle Tipps zum sicheren Umgang und zur richtigen Pflege Deines Lithium-Ionen-Akkus. Ausführliche Informationen und Hinweise kannst Du der im Lieferumfang enthaltenen Betriebsanleitung Deines Rollstuhls entnehmen.

Akkus, Ladegerät und Ladezeit.....	2
Laden der Akkus.....	3
Sicherheit.....	3
Reichweite	4
Pflege und Lebensdauer	5
Fragen und Antworten	6



Position Akku ergoflix® L und LX

Akkus, Ladegerät und Ladezeit

Lithium-Ionen-Akkus – ergoflix® L und LX (inkl. Plus-Varianten)



Abbildung 1: Akku des ergoflix®L und LX mit dem dazugehörigen Ladegerät und Anschlüssen



Brand- und Stromschlaggefahr

Die Akkus dürfen in keinem Fall mit anderen Ladegeräten geladen werden! Durch unsachgemäße Handhabung oder Verwenden eines anderen Ladegeräts besteht eine Brand- und Stromschlaggefahr!

Ladezeit

Die Ladezeit des Akkus ist abhängig von der Kapazität des Akkus.

Der Akku des ergoflix®L und LX kann sowohl über die Bedieneinheit (gleichzeitiges Laden beider Akkus) als auch über den Akku selbst geladen werden.



Die Ladezeit je Akku beträgt 3 Stunden.


Ladestandsanzeige an der Bedieneinheit:



70%

100%

Ladestandsanzeige am einzelnen Akku:

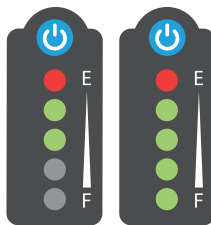

70%

100%

Entferne das Ladegerät, sobald die Akkuanzeige grün aufleuchtet.

Laden der Akkus

Umgebung


Das Laden sollte in trockener Umgebung und bei einer konstanten Raumtemperatur sowie bei installiertem Rauchmelder erfolgen.

Laden über das Bedienelement

Am einfachsten lassen sich die Akkus direkt über das Bedienelement laden. Dazu wird der Lade-stecker für das Bedienelement in die dazu vorgesehene Ladebuchse im Bedienelement und der Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose gesteckt.

Separates Laden der Akkus

Verbinde das Ladegerät mit der vorgesehenen Ladebuchse vorne am Akku.

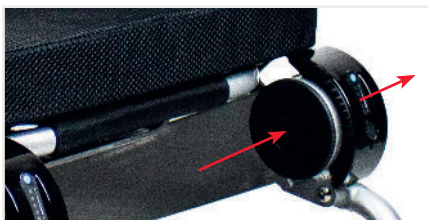

Entnehmen der Akkus

Alternativ kannst Du die Akkus auch entnehmen, um sie außerhalb des elektrischen Rollstuhls zu laden. Dazu betätigst Du einfach den Druckknopf innen an der Akkufassung.

Abbildung 2: Entnehmen der Akkus anhand des Druckknopfes innen an der Akkufassung, um sie außerhalb des elektrischen Rollstuhls zu laden.

Sicherheit

Empfehlungen zum sicheren Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus

Die Akkus unserer ergoflix-Modelle sind Lithium-Ionen-Akkus, die nach dem aktuellen Stand der Technik entwickelt und hergestellt werden. Die in Europa geltenden Sicherheitsnormen werden hierbei eingehalten.

Im geladenen Zustand haben diese Lithium-Ionen-Akkus einen hohen Energieinhalt. Die Inhaltsstoffe von Lithium-Ionen-Batteriezellen sind grundsätzlich unter bestimmten Bedingungen entflammbar. Verhaltensregeln zum sicheren Umgang finden sich auch noch in der Bedienungsanleitung.

Sicheres Laden

Das ergoflix-Ladegerät schützt den Akku in Verbindung mit dem im Akku integrierten Batterie-Management-System vor Überlastung beim Laden, vor Schäden durch Extremüberladung oder vor einem Kurzschluss. Das ergoflix-Ladegerät darf ausschließlich für einen ergoflix-Rollstuhl verwendet werden, da die Komponenten einen perfekt abgestimmten Ladeprozess sicherstellen.



Die Akkus dürfen nicht mit anderen Ladegeräten geladen werden! Durch unsachgemäße Handhabung oder Verwenden eines anderen Ladegeräts besteht eine Brand- und Stromschlaggefahr!

Akkus dürfen nicht in der Nähe von Hitzequellen oder leicht entflammaren Materialien geladen werden. Wir empfehlen das Laden in unbewohnten Räumen, in denen ein Rauchmelder vorhanden ist. Sobald die Akkuanzeige auf dem Ladegerät grün aufleuchtet, sollten die Akkus vom Stromnetz getrennt werden.

Gut geschützt

Jeder ergoflix-Akku ist durch ein robustes Strangpress-Aluminiumgehäuse geschützt. Dieses Gehäuse darf nicht geöffnet werden. Außerdem müssen mechanische Belastungen wie Stöße oder Beschädigungen und starke Hitzeeinwirkung vermieden werden, da sie die Batteriezellen beschädigen könnten und zum Austritt von entflammaren Inhaltsstoffen führen.



Verhindere starke oder häufige Tiefentladung des Akkus durch zu lange Lagerung in komplett entleertem Zustand. Dies kann zu deutlichem Kapazitätsverlust und zu irreversiblen Schäden des Akkus führen.

Lagerung

Übermäßige Erwärmung sollte vermieden werden. ergoflix-Akkus und -Ladegeräte dürfen nicht in der Nähe von Hitzequellen oder leicht entflammaren Materialien gelagert werden. Wir empfehlen die Lagerung von ergoflix-Akkus im Rollstuhl in unbewohnten Räumen, in denen Rauchmelder vorhanden sind. Hierzu eignen sich trockene Orte mit einer Umgebungstemperatur von etwa 20 °C besonders gut.

Reinigung

Die Reinigung des elektrischen Rollstuhls mit direktem Wasserstrahl ist zum Schutz insbesondere der elektronischen Komponenten nicht gestattet. Wir empfehlen stattdessen, den Rollstuhl mit einem feuchten Tuch zu reinigen und vor jeder Reinigung die Akkus zu entfernen.

Fachgerechte Entsorgung von beschädigten, verbrauchten und nicht mehr benutzten Akkus

Stark beschädigte Batterien und Akkus sollten niemals mit bloßen Händen angefasst werden, da Elektrolyt austreten und zu Haut- oder Augenreizungen führen kann. Beschädigte Akkus sollten am besten an einem sicheren Ort im Freien mit abgeklebten Polen aufbewahrt werden.

Dein Sanitätshaus oder wir kümmern uns um eine fachgerechte Entsorgung.

Reichweite

Die Reichweite einer Akkuladung ist abhängig von vielen Einflussfaktoren.

Tipps und Tricks für längeren Fahrspaß

Fahrtgeschwindigkeit anpassen

Je höher die Geschwindigkeit, desto höher ist der Stromverbrauch. Passe die Fahrtgeschwindigkeit der geplanten Fahrtzeit an.

Anfahren und Bremsen

Häufiges Anfahren und Bremsen ist wie bei einem Auto weniger wirtschaftlich als lange Strecken mit möglichst gleichmäßiger Geschwindigkeit zu fahren.

Akku und Temperatur

Mit besonders tiefer oder hoher Temperatur nimmt die Leistungsfähigkeit des Akkus ab, da sich der elektrische Widerstand im Akku erhöht. Es ist dann mit einer reduzierten Reichweite zu rechnen. Lagere den Akku daher am besten bei einer konstanten Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Gewicht

Eine hohe Zuladung führt zu Einbußen hinsichtlich der Reichweite. Daher sollte die Mitnahme von zusätzlichem Gepäck nicht unnötig hoch sein.

Akkuzustand

Je älter oder verschlissener die Akkus sind, desto geringer ist die Kapazität. Bitte gehe sorgsam mit den Akkus um, um möglichst langen Fahrspaß genießen zu können.

Äußere Bedingungen

Unterschiedliche Geländeeigenschaften wie Steigungen oder Unebenheiten, aber auch starker Wind können die Reichweite negativ beeinflussen.

Pflege und Lebensdauer

Pflege

Lagerung

Die Akkus sollten trocken und im Rollstuhl verbaut bei Raumtemperatur gelagert werden. Für eine möglichst lange Lebensdauer der Akkus sollten diese bei einem Ladezustand von 40 bis 60% gelagert werden. Bei längerer Lagerung sollten die Akkus alle 2 Monate erneut auf 40 bis 60% geladen werden, da sie sich auch bei Nichtbenutzung noch geringfügig entladen.



Verhindere starke oder häufige Tiefentladung des Akkus durch zu lange Lagerung in komplett entleertem Zustand. Dies kann zu deutlichem Kapazitätsverlust und zu irreversiblen Schäden des Akkus führen.

Reinigung und Pflege

Die Steckerpole sollten gelegentlich mit einem sauberen und trockenen Tuch gereinigt werden. Die Akkus sollten vor jeder Reinigung des Rollstuhls entnommen werden. Zum Schutz der elektronischen Komponente dürfen die Akkus nicht mit direktem Wasserstrahl oder gar Hochdruck in Berührung kommen.

Winterbetrieb

Sollte der elektrische Rollstuhl auch im Winter, insbesondere bei Temperaturen unter 0°C, genutzt werden, empfiehlt es sich, den bei Raumtemperatur geladenen und gelagerten Akku erst kurz vor Fahrtantritt in den elektrischen Rollstuhl einzusetzen.

Lebensdauer

Die Lebensdauer eines Akkus wird vor allem durch die Art und Dauer der Beanspruchung und der richtigen Pflege beeinflusst.

Faktoren, die eine Lebensdauer verlängern:

- + geringe Beanspruchung
- + Lagerung bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 20°C
- + Lagerung in einem 40 – 60% Ladezustand
- + regelmäßiges Auf- und Entladen

Faktoren, die eine Lebensdauer verkürzen:

- starke Beanspruchung
- Lagerung bei einer Umgebungstemperatur unter 0°C und über 30°C
- längere Lagerung in ganz vollem oder völlig entleertem Zustand

Fragen und Antworten

Was tun, wenn Wasser in die Akku-Halterung läuft?

Die Halterungen der ergoflix-Akkus wurden so konzipiert, dass eindringendes Wasser ablaufen kann. Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass kein Wasser in die Halterungen läuft. Verwende bei Bedarf Polfette oder technische Vaseline, um die Pole der Akkus zu schmieren und so vor Korrosion zu schützen.

Kann man bereits gebrauchte Akkus erneuern?

Einzelne Anbieter versprechen, verbrauchte Zellen auffrischen zu können. Wir raten Dir jedoch dringend davon ab. Denn Sicherheit und optimale Zusammenarbeit mit dem Batterie-Management-System können in diesem Fall nicht mehr gewährleistet werden. Darüber hinaus besteht ein Sicherheitsrisiko. Durch eine Öffnung oder Veränderung des Akkus können gegebenenfalls Garantie- und Gewährleistungsansprüche erlöschen.

Was geschieht mit defekten Akkus?

Stark beschädigte Akkus sollten nicht mit bloßen Händen angefasst werden, da Elektrolyt austreten und zu Hautreizungen führen kann. Beschädigte Akkus werden am besten an einem sicheren Ort im Freien mit abgeklebten Kontakten aufbewahrt und vom Händler entsorgt.

Kann ich einen gebraucht gekauften Akku benutzen?

Beim Kauf von gebrauchten Akkus ist unbedingt darauf zu achten, dass diese unbeschädigt vom Vorbesitzer übernommen werden. Im Internet werden gelegentlich defekte oder reparierte Akkus angeboten, die ein hohes Risiko bergen und zu gefährlichen Fehlfunktionen führen können. Gelegentlich wird im Internet auch illegale Ware, z.B. aus Diebstählen, angeboten. An solcher Ware kann gegebenenfalls gemäß §935 BGB legal kein Eigentum erworben werden.

Sind Ladegeräte von Fremdherstellern sicher nutzbar?

Es dürfen in keinem Fall Ladegeräte von Fremdherstellern verwendet werden. Die ergoflix-Ladegeräte sind speziell auf unsere Rollstühle abgestimmt. Wenn ein anderes Ladegerät benutzt wird, riskierst Du nicht nur eine kürzere Lebensdauer des Akkus oder andere Schäden und Fehlfunktionen, sondern es besteht auch eine erhöhte Sicherheitsgefahr!

Lassen sich die Akkus öffnen und reparieren?

Die ergoflix-Akkus dürfen ausdrücklich nicht geöffnet werden, auch nicht im Rahmen einer Reparatur durch Dritte.

Ein Öffnen des Akkus bedeutet immer einen Eingriff in den vom Hersteller freigegebenen Zustand und birgt sicherheitsrelevante Risiken. Es besteht die Gefahr, dass der einmal geöffnete Akku infolge unsachgemäßer Reparatur (z. B. wegen gequetschter oder nicht korrekt verlegter Kabel, gelöster Komponenten oder qualitativ minderwertiger elektrischer Verbindungen) durch einen Kurzschluss in Brand geraten kann.

Nach dem Öffnen kann zudem die Dichtheit des Gehäuses nicht mehr gewährleistet werden, sodass das Eindringen von Wasser oder Staub zu Schädigungen an der Überwachungselektronik (Batterie-Management-System) oder an den Zellen führen kann. Auch hier besteht die Gefahr, dass der Akku durch einen Kurzschluss in Brand gerät. Diese Gefahren bestehen bei Weiterverwendung eines einmal geöffneten Akkus auch zu einem späteren Zeitpunkt.

Generell müssen Akkus aus Sicherheitsgründen, um gewerblich transportiert werden zu dürfen, die Anforderungen nach UN-T38.3 erfüllen. Der Prüfplan nach UN-T38.3 beinhaltet verschiedene Sicherheitstests an einer vorgeschriebenen Anzahl von Akkus, bei denen die zu prüfenden Akkus an ihre Belastungsgrenzen geführt werden. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Überlasttests, Schlagprüfungen, Kurzschlussprüfungen, Vibrationen, thermische Tests etc. ergoflix-Akkus sind nach UN-T 38.3 zertifiziert.

Im Falle der Beschädigung eines oder mehrerer Akkus ist stets der Fachhandelspartner zu kontaktieren.

Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes, filling the majority of the page below the 'Notizen' header.

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20, 46499 Hamminkeln

Fon 0 28 52 945 90-00

Fax 0 28 52 945 90-99

info@ergoflix.de, www.ergoflix.de

Öffnungszeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.

Stand: Januar 2023 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte.

Hersteller:

Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd.
No. 116 Qicang Road, Mingguang, Chuzhou
Anhui Province, Anhui, 239400
CHINA



SUNGO Europe B. V.
Fascinato Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands