


rollz®



rollz motion

Rollator

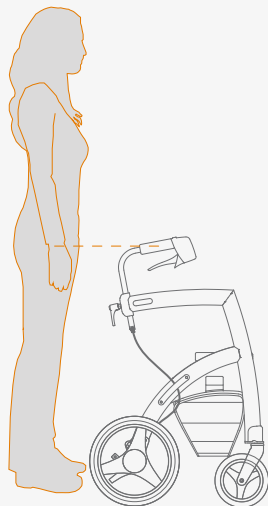



Höhe einstellen

Stellen Sie die Handgriffe auf die Höhe Ihrer Handgelenke ein. Lösen Sie die Verstellgriffe und schieben Sie die Handgriffe nach oben oder unten. Dann die Verstellgriffe festziehen.

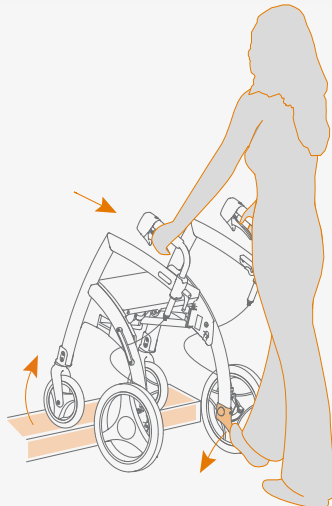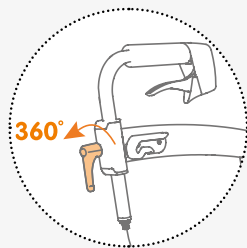


Schwellenhilfe

Stellen Sie Ihren Fuß auf die Ankipphilfe und ziehen Sie den Rollator langsam vor sich, um eine Schwelle zu überqueren.

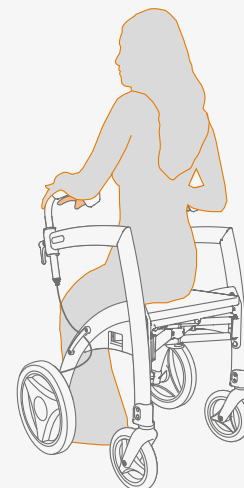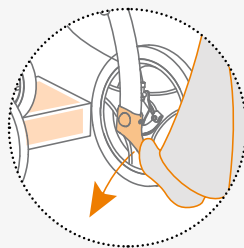

Sich hinsetzen


Betätigen Sie immer die Feststellbremsen, wenn Sie sich hinsetzen wollen.

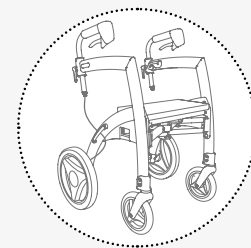


Nutzergewicht max. 125 kg

Bremsen


Betätigen Sie gleichzeitig auf beiden Seiten die Bremsen.


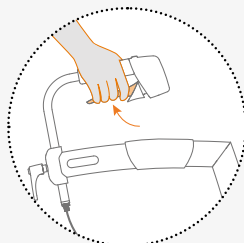


Verwenden Sie die Feststellbremse, indem Sie sowohl die schwarzen Handbremsen (1) als auch die grauen Feststellbremshebel (2) betätigen.

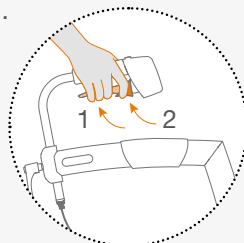


Lösen Sie die Feststellbremse, indem Sie die schwarzen Handbremsen betätigen.

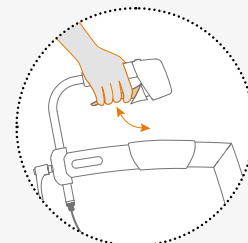

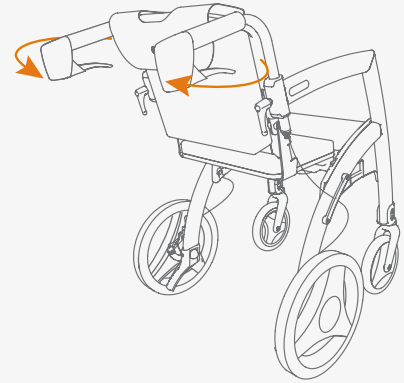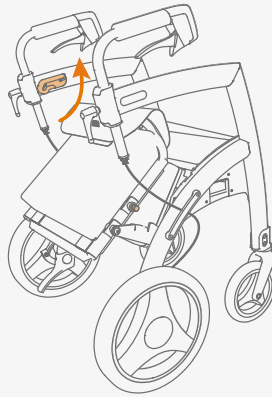

Paket platzieren

Heben Sie den roten Hebel an und setzen Sie die Verriegelungsstifte in die Führungen hinter dem Sitz ein. Verschließen Sie das Paket, indem Sie den roten Hebel nach unten drücken.

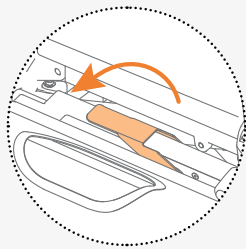


Paket entfalten

Ziehen Sie das Rollstuhlpaket schräg nach oben und dann nach hinten. Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungsstifte in die Führungen am Rahmen gleiten.



Handgriffe drehen

Lösen Sie die Verstellgriffe mit zwei vollen Umdrehungen. Drehen Sie die Handgriffe nach hinten. Die richtige Höhe einstellen und die Einstellgriffe wieder festziehen.

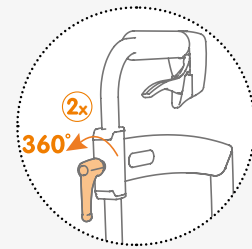

Vom Rollator zum Rollstuhl

Umwandlung dauert nur eine Minute. Sehen Sie sich das YouTube-Video an.



Fußstützen platzieren

Nehmen Sie die Fußstützen aus dem Rollstuhlpaket und schieben Sie sie sanft von oben über die Fußstützenhalter.

