



Schraube lösen um Lenkerhöhe einzustellen

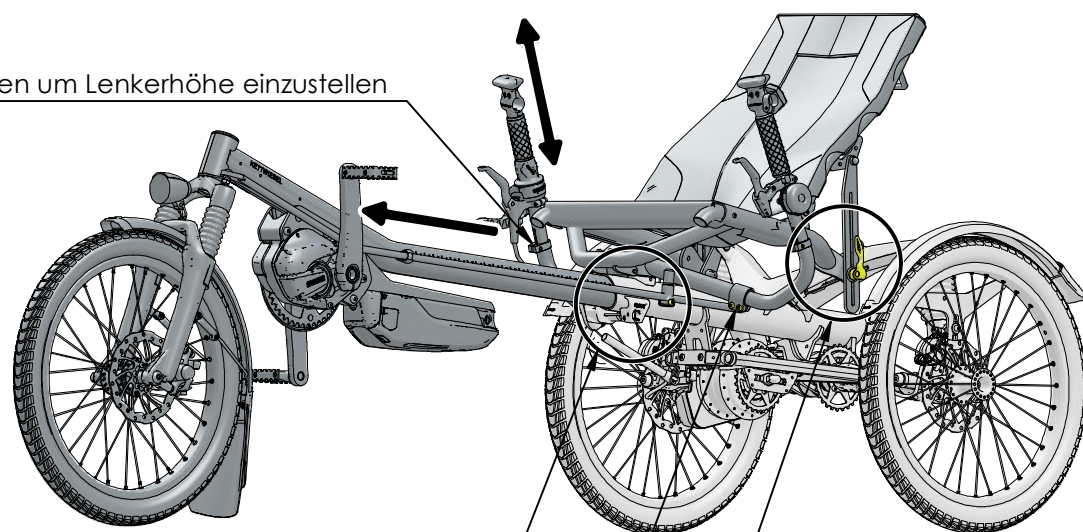


Schraube **4 Umdrehungen** lösen
um Rahmenlänge einzustellen

Schrauben lösen um Lenkerbreite und -neigung einzustellen

Schnellspanner öffnen um Sitzhöhe und -neigung einzustellen

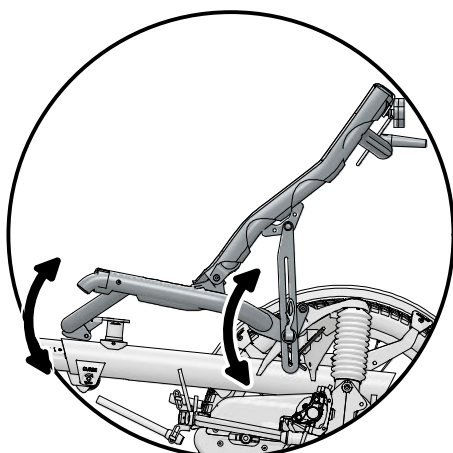


flache Sitzposition

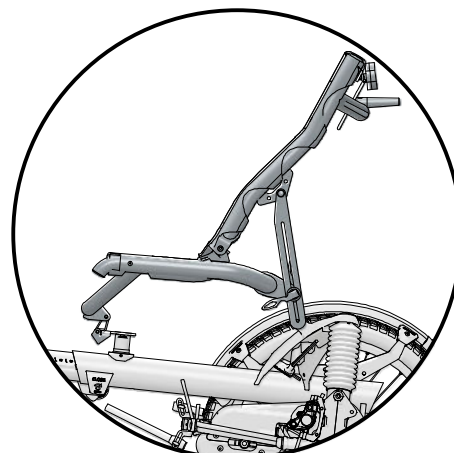


hohe Sitzposition




Hier ist das Werkzeug

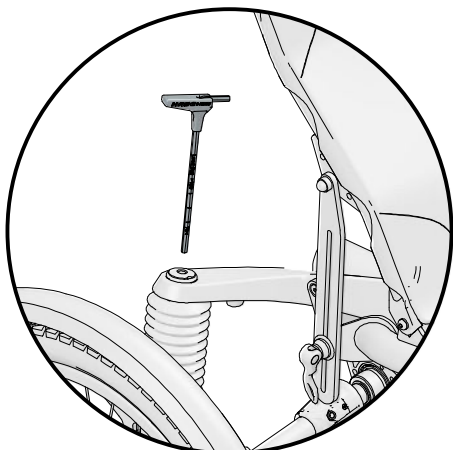

Einstellen der Federung je nach Beladung

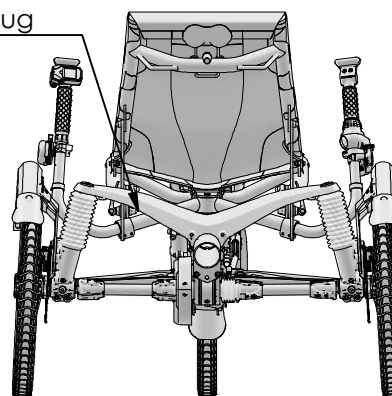


Loosen bolt and adjust height of handlebar

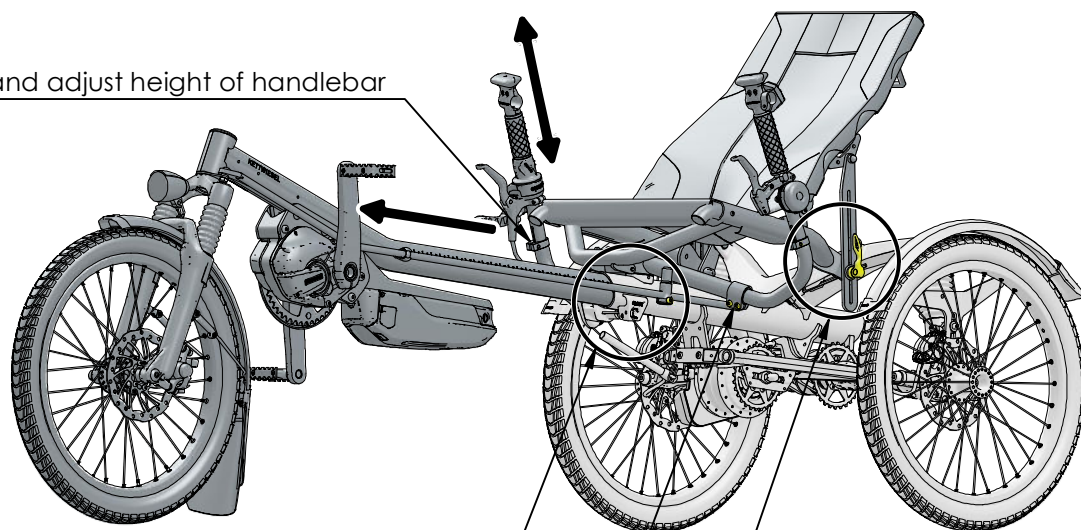


Loosen bolts **4 turns** and adjust length

Loosen bolts to adjust width and angle of handlebar

Open Quick Releases and adjust height & tilt of the seat

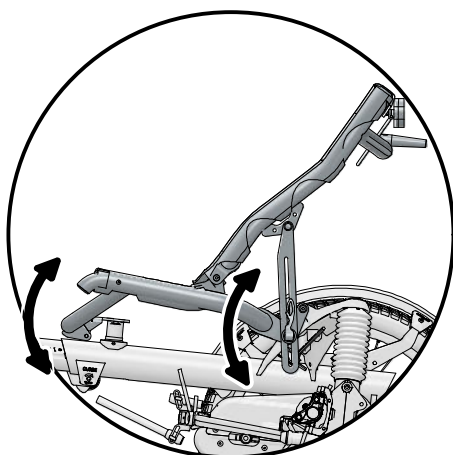


Flat seating position

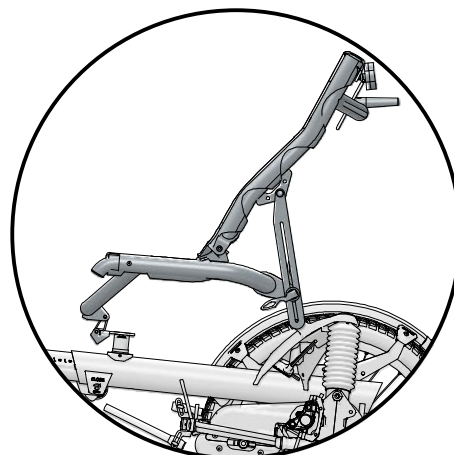


High seating position




Trike Tool is here

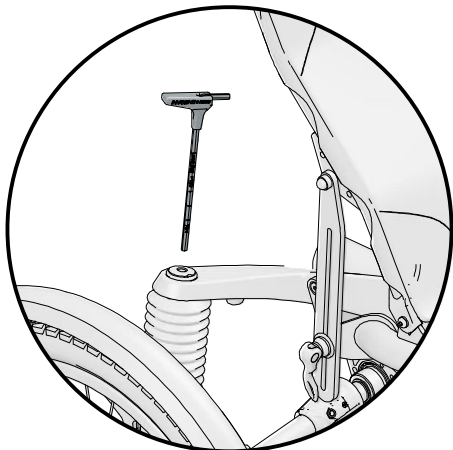

Adjust suspension according
load on both sides

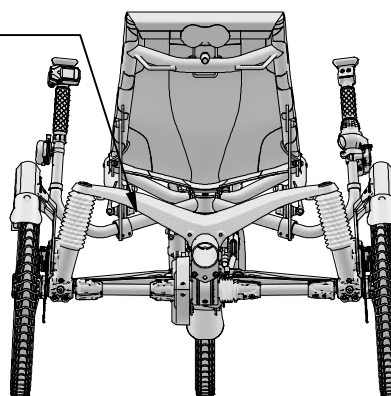


Desserrer le boulon et régler hauteur du guidon

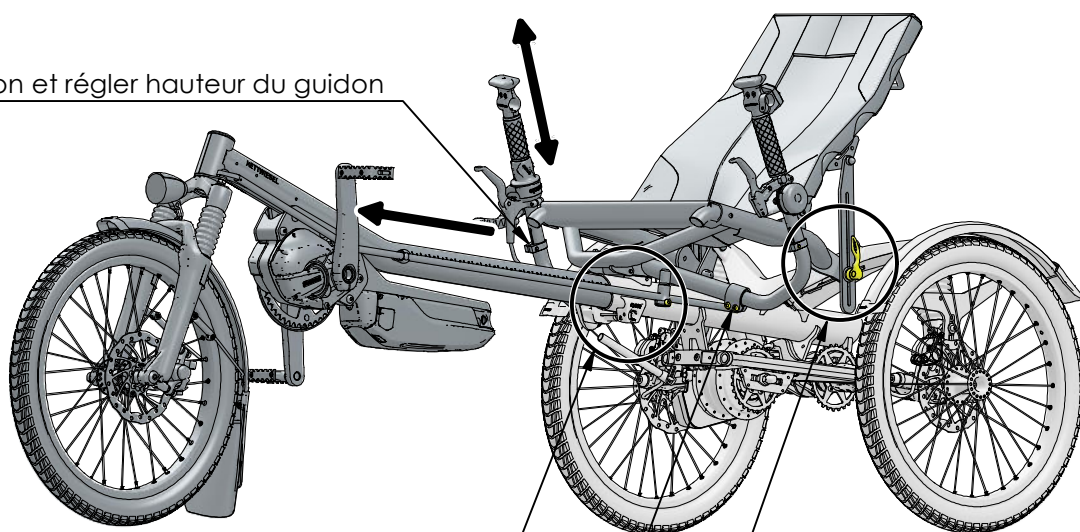


Desserrer le boulon de **4 tours** et ajuster la longueur

Desserrer les boulons pour régler la largeur et l'angle du guidon

Ouvrir les déverrouillages rapides et régler la hauteur et l'inclinaison du siège

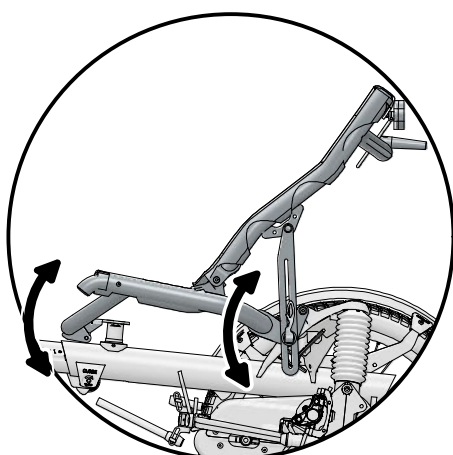


position assise plate

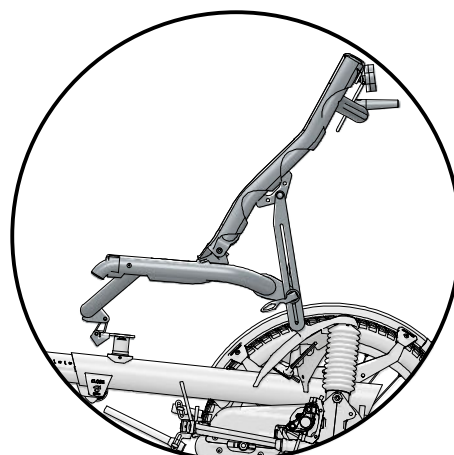


position assise haute




Trike Tool est ici

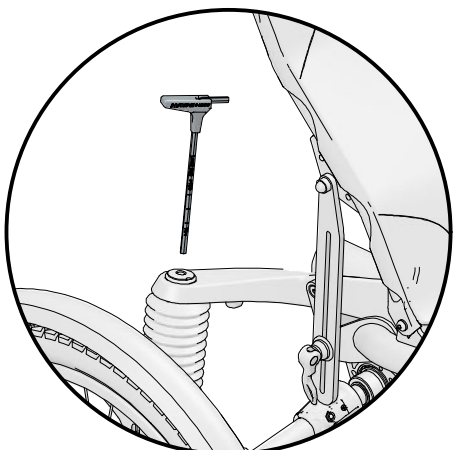

Ajuster la suspension en fonction la charge des deux côtés

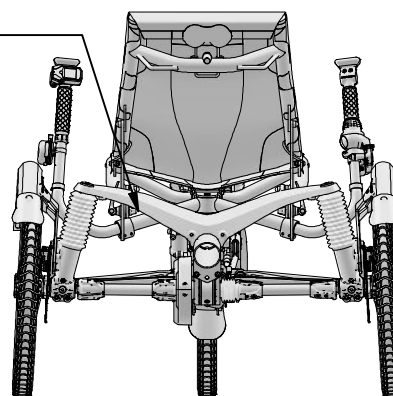


Draai de bout los en stel hoogte van stuur

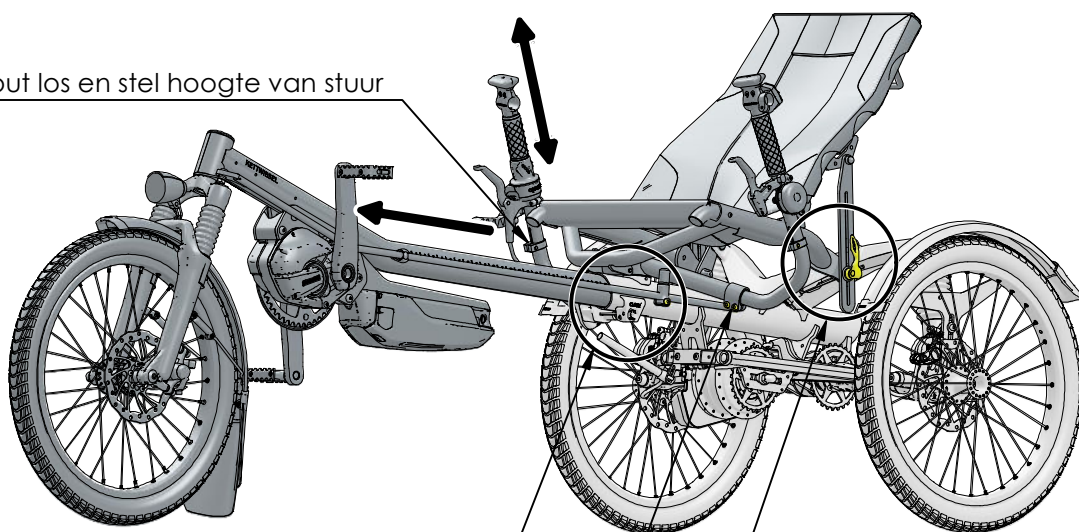


Draai de bouten **4 slagen** los en pas de lengte aan

Draai de bouten los om de breedte en hoek van het stuur

Open snelsluitingen en de hoogte en neiging van de stoel aanpassen

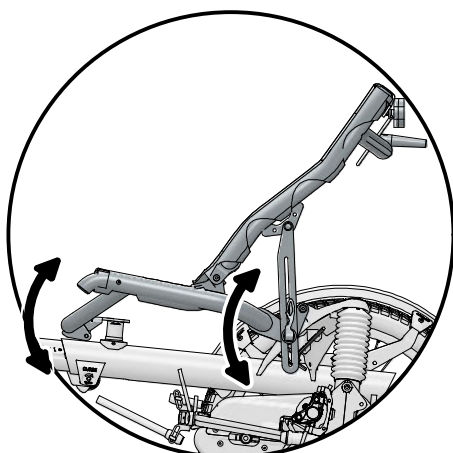


Vlakke zitpositie

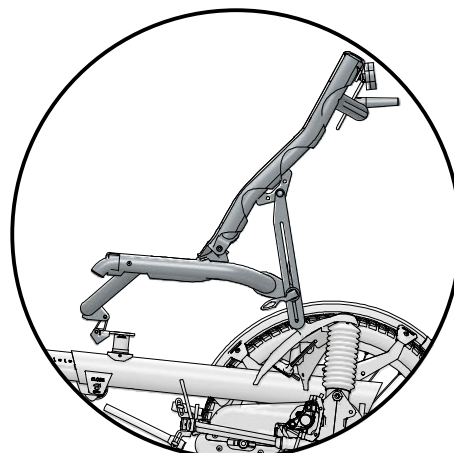

Hoge zitpositie



Trike Tool is hier

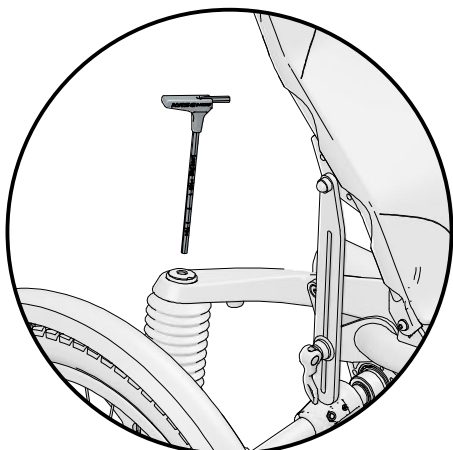

Pas de ophanging aan volgens
belasting aan beide zijden

